

高齢者、軽度障害者の自立補助用品

らくつえ 杖



御爺ちゃん、御婆ちゃんのお散歩のお供にいかがですか？
使い方は簡単、楽々棒に楽々杖を差し込むだけ。
取り外しもストッパーを上にあげて抜くだけなので簡単です。

ご使用中の楽々棒を楽々杖に差し込むだけ。



差し込む

ロックする


使う

引き上げる

お求めいただく前に
ステッキのサイズを
お確かめ下さい。

ステッキの正しい
はかり方・選び方

- ① ステッキを持手側から前方外側約20cmのところにおく。
- ② ひじを約15°曲げる。
- ③ この状態でステッキの長さをはかり、適したサイズをお知らせ下さい。

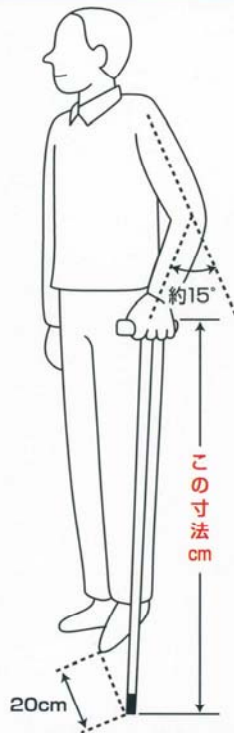

取扱説明

- ご使用前に、この説明をよく読んで理解し、正しく使用して下さい。
- お読みになった後は保存し、わからない時に再読して下さい。

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。
●表示と意味は次の通りです。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

注意

- ①左記に示している楽々杖を参考にステッキの長さをはかり、からだに合ったステッキをお選び下さい。長さが合わないステッキを使用すると、思わぬケガをする恐れがあります。
※長さの調節は、販売店にご相談下さい。
- ②ご使用前に、以下を確認して下さい。確認しないで使用すると、思わぬケガをする恐れがあります。
 - 1.グリップと支柱のつけ根がゆるんでいないか。
 - 2.先ゴムがしっかりとまっまっているか。
※異常がある場合は販売店等にお申し出下さい。
 - 3.先ゴムが破れたり、すり減っていないか。
※先ゴムは定期的に交換して下さい。
- ③雪道や凍結路面、ぬれている路面など、すべりやすい路面で使用するときは、ご注意下さい。
- ④楽々杖は、歩くための補助具です。全体重をかけて使用しないで下さい。
- ⑤用途以外(登山用、護身用など)には使用しないで下さい。
- ⑥グリップは正しく握って使用して下さい。

生産物賠償責任保険付

是非一度楽々棒と楽々杖を御試し下さい。
詳しくはホームページで御案内をして居ります。

紙：パンフレット



和田工業株式会社
<http://wada-kk.info>
岐阜県各務原市金属団地50番地
TEL0583-82-1291 FAX0583-82-1292
E-mail:info@wada-kk.jp

代理店